


### Как собрать контейнер для утилизации игл

Наденьте крышку на контейнер.

#### • 3,2 л



#### • 1 л

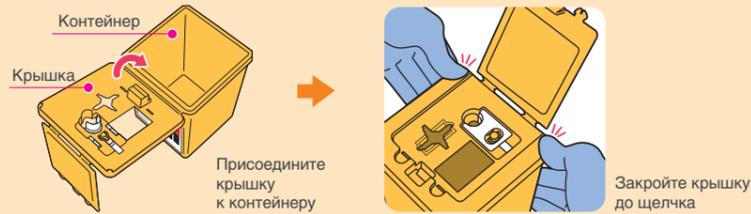


### Как открыть/закрыть крышку для временной блокировки контейнера



### Как утилизировать заполненный контейнер

Когда контейнер заполнен до указанной линии, закройте крышку до щелчка, вставив защелки, расположенные по краям крышки, в соответствующие пазы.

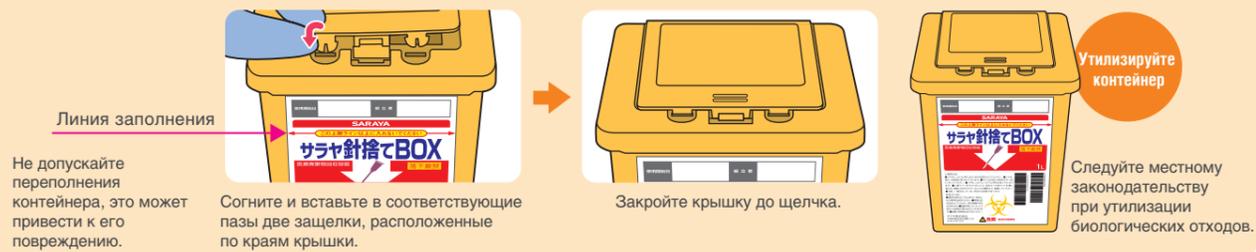

### Опции (кронштейн и подставка)

Возможность крепления контейнера к вертикальной поверхности при помощи кронштейна. Надежная фиксация контейнера на полу при помощи специальной нижней подставки. Подставка предотвращает скольжение контейнера и случайное опрокидывание.

#### • 3,2 л



#### • 1 л



Наименование	Объем	Кол-во в упаковке	Артикул	Размеры	Штрих-код
Контейнер для утилизации игл	1 л	60	45321	109 (Ш) x 113 (Г) x 135 (В) мм (внутренняя упаковка)	49-87696-45321-0
				360 (Ш) x 700 (Г) x 380 (В) мм (внешняя упаковка)	
Контейнер для утилизации игл	3,2 л	20	45312	231 (Ш) x 131 (Г) x 185 (В) мм (внутренняя упаковка)	49-87696-45312-8
				500 (Ш) x 430 (Г) x 490 (В) мм (внешняя упаковка)	

Официальный представитель в РБ: [www.medsteril.by](http://www.medsteril.by)  
 ООО «Регион Поставщик» [instagram: @med.steril](https://www.instagram.com/med.steril)  
 220029, г. Минск, пр-т Машерова, 9, пом.1, комн. 309 Vel. 8(029) 671-58-71, МТС 8(029) 571-58-71  
 E-mail: [regionpostavschik@gmail.com](mailto:regionpostavschik@gmail.com)  
[adamovich\\_w@mail.ru](mailto:adamovich_w@mail.ru)

## КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИГЛ

### 1 л / 3,2 л

- Защита от проникновения внешних посторонних предметов
- Благодаря ударопрочному корпусу исключены повреждения и нарушения целостности контейнера
- Временный замок и система полной блокировки
- Предотвращают риск случайного укола потенциально инфицированной иглой

Линия заполнения контейнера




Рекомендации по предотвращению случайных порезов острым инструментом

- Предназначены для одноразового использования
- Утилизируйте иглы сразу после применения
- Самостоятельно утилизируйте иглы, не передавайте использованные иглы другому человеку
- Используйте перчатки при утилизации игл
- Заранее подготовьте необходимое количество контейнеров

# 5 типов игл, которые чаще всего приводят к случайному уколу: одноразовые иглы для шприцов, иглы-бабочки, хирургические иглы, иглы-катетеры и инъекционные иглы

Исследование случаев случайного укола иглой

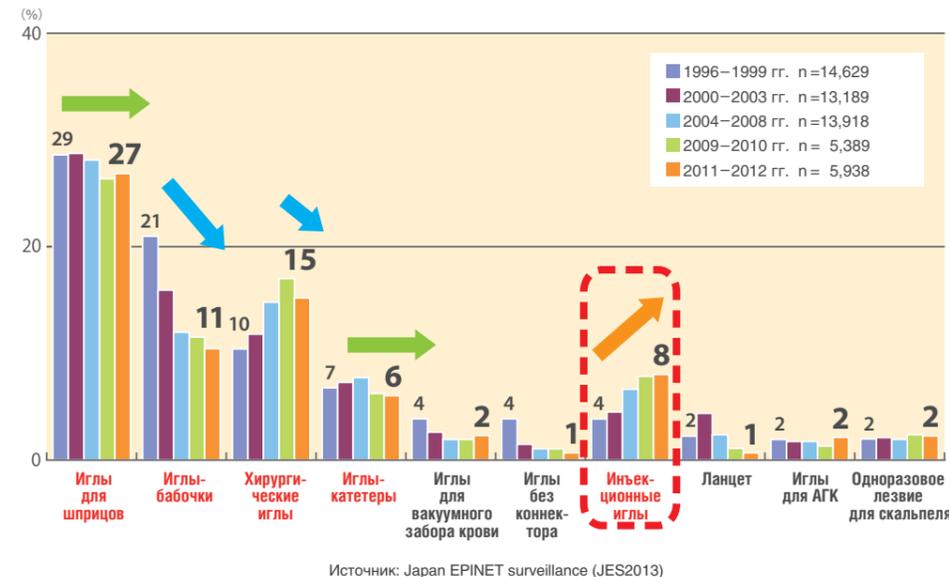


Выбор правильного контейнера для утилизации игл критически важен для предотвращения случайного повреждения потенциально инфицированной иглой.


Источник: Japan EPINET surveillance (JES2013)

## Контейнеры Saraya подходят для всех видов игл. Как отсоединить луер-слип/луер-лок со шприца?

### Для того, чтобы отсоединить луер-слип

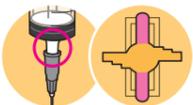

Вставьте наконечник шприца в соответствующее отверстие в контейнере (верхнее и нижнее, если смотреть сверху на контейнер). На рисунке отверстия отмечены розовым цветом. Для контейнера 3,2 л вставьте наконечник шприца с иглой в указанное на рисунке отверстие (нижнее).

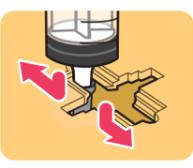


Вставьте наконечник шприца с иглой в любое из указанных на рисунке отверстий.



Поднимите шприц вверх, при этом использованная игла упадет в контейнер.


### Для того, чтобы отсоединить луер-лок

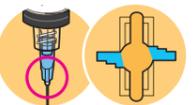

Для того, чтобы отсоединить луер-лок, вставьте шприц вместе с иглой в соответствующее отверстие в контейнере (правое или левое, если смотреть на контейнер сверху).




Поместите наконечник шприца с иглой в соответствующее отверстие (левое или правое в зависимости от формы иглы).

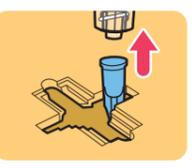


Начинайте вращать шприц в левую сторону, игла открутится от шприца и упадет в контейнер.

## 3,2 л Как отсоединить луер-лок при помощи слайдера?

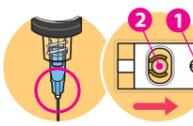

Способ утилизации с использованием слайдера

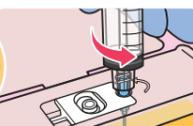

Поместите слайдер в положение «Закрыто». Вставьте шприц в отверстие 1 (см. рисунок). Поверните шприц влево.




Переместите слайдер вправо в положение «Открыто», нажимая при этом на кнопку 2. Отверстие 1 раскроется, и игла упадет в контейнер.



Верните слайдер в положение «Закрыто».

## 1 л Как удалить иглу со шприц-ручки при помощи слайдера?

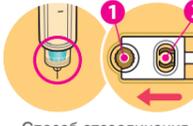


Способ отсоединения иглы при помощи слайдера



Переместите слайдер влево в положение «Закрыто» и поместите шприц в отверстие 1. Отсоедините иглу, вращая шприц влево. Затем вытяните шприц вверх.



Переместите слайдер вправо в положение «Открыто», нажимая на кнопку 2. Отверстие 1 откроется, и игла упадет в контейнер.

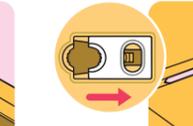

Переместите слайдер влево в положение «Закрыто».



Придерживайте слайдер, вытаскивая шприц.




Контейнеры Saraya для утилизации игл разработаны в соответствии с требованиями организаций NIOSH (National Institute for Occupational Safety, Japan) и CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA).

## Контейнер для утилизации игл 3,2 л

Размеры: 231 (Ш) x 131 (Г) x 185 (В) (не включая ручку)  
Объем: 3,2 л

- Возможность отсоединения иглы с креплением луер-лок при помощи слайдера
- 20 мл шприц может быть утилизирован без отсоединения иглы
- Защитная панель, предотвращающая случайное выпадение использованных игл и шприцов
- Удобен в транспортировке

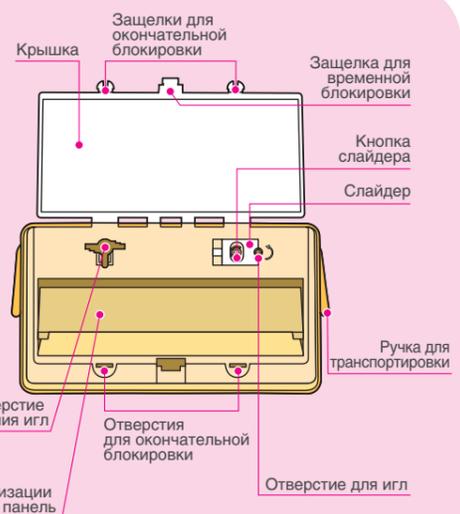

## Контейнер для утилизации игл 1 л

Размеры: 109 (Ш) x 113 (Г) x 135 (В)  
Объем: 1 л

- Возможность отсоединения игл со шприц-ручек
- Компактные размеры – возможность размещения в любом месте

